


Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Polster für Ober- und Unterkieferzahnprothesen

Anwendungsinformation

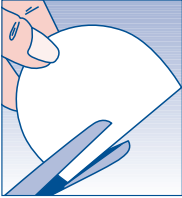1.  **Oberkiefer-Prothese**
Bei kleinen Prothesen das Polster mit einer Schere passend zuschneiden (siehe Abbildung). Danach das Polster 10 Sek. in hand-warmes Wasser tauchen und abtropfen lassen.

1.  **Unterkiefer-Prothese**
Bei kleinen Prothesen das Polster passend zuschneiden. Polster anfeuchten und auflegen wie beim Oberkiefer.

2.  Polster auf die befeuchtete Prothese legen. Die hinteren 2 mm müssen unbedeckt bleiben. Polster mit beiden Daumen andrücken (in der Mitte beginnend) bis es überall glatt liegt.

2.  Polster mit Zeigefinger in die Vertiefung der Prothese drücken (in der Mitte beginnend) bis es überall anliegt.

Anwendungsgebiete

Haftmittel für Zahnprothesen.

Wichtige Hinweise

Nur auf der gesunden Schleimhaut anwenden. Aus hygienischen Gründen ist das **Protefix®** Haft-Polster mindestens einmal täglich zu wechseln. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung

Vlies bestehend aus Natriumalginat, Viskose-Faser, Polypropylen-Faser.

Gegenanzeigen




Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Protefix® Haft-Polster möglichst trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für Vollprothesen. Nicht für Teilprothesen oder kombinierten Zahnersatz (Cover-Denture, Teleskope, Konuskronen, Anker, Geschiebe etc.).

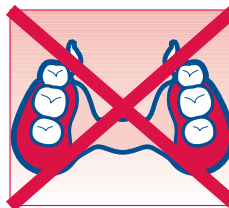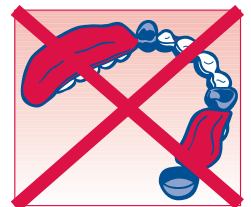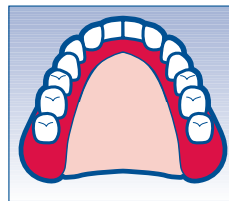


Queisser
PHARMA



D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie **Protefix®** Haft-Polster?

- bei mir hält nichts anderes
 ich habe (ständig) Druckschmerzen
 ich habe eine Interimsprothese
 ich probiere **Protefix®** Haft-Polster gerade aus

Einige Anmerkungen zur Anwendung:

- das Polster hat die richtige Größe
 das Polster ist zu groß zu klein

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 nein

Ich bin _____ Jahre alt und
verwende **Protefix®** Haft-Polster seit _____ Jahren
für den Oberkiefer Unterkiefer.

Ihre persönlichen Daten

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: www.protefix.de oder E-mail: info@queisser.de.



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel.

Protefix® Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspangen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnspanne oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



Protefix® Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.