

**Gebrauchsinformation!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**



## Sicherheit für die Dritten. Protefix®

### Protefix® Aktiv-Reiniger



Wie bei einem natürlichen Gebiss setzen sich auch an einer Prothese Speisereste ab, die durch eine sorgfältige Mundhygiene entfernt werden müssen. Denn wenn Essensreste unter die Prothese gelangen, können schmerzhafte Entzündungen entstehen, weil die natürliche Mundflora beim Tragen einer Zahnprothese gestört ist und so keine vollständige Selbstreinigung des Mundraumes erfolgen kann. Deshalb sollten Sie in diesem Fall nicht nur auf Ihre Zahnbürste, sondern vielmehr auf eine gute Reinigungstablette vertrauen.

Der **Protefix®** Aktiv-Reiniger zeichnet sich dabei besonders aus, denn er besitzt zugleich hohe Reinigungskraft und starke geruchstillende Wirkung. Durch seine Zusammensetzung verfügt der **Protefix®** Aktiv-Reiniger über genügend Sauerstoff. So reinigt er die Zahnprothese selbstständig, gründlich und schnell, ohne dass das Prothesenmaterial angegriffen wird.

#### Dosierung und Anwendung

Eine **Protefix®** Aktiv-Reinigungstablette in ein halbvolleres Glas mit lauwarmem Wasser geben.

Die Zahnprothese in das Wasser legen und etwa 15 Minuten darin liegen lassen (Zahnprothese muss vollständig bedeckt sein).

Nach der Reinigung die Zahnprothese gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

#### Ingredients

Sodium Bicarbonate, Potassium Caroate, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, CI 73015

Vertrieb in der Schweiz:  
Biomed AG, CH-8600 Dübendorf

  
**Queisser**  
PHARMA  
D-24914 Flensburg  
www.queisser.de

## Ihre Meinung liegt uns am Herzen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

### Wie haben Sie **Protefix®** Aktiv-Reiniger kennengelernt?

- Apotheker  Bekannte  
 Zahnarzt  Werbung

### Warum verwenden Sie **Protefix®** Aktiv-Reiniger?

- mich überzeugt die Produktleistung  
 andere Marken haben mich enttäuscht  
 ich probiere **Protefix®** Aktiv-Reiniger gerade aus

### Sind Sie mit der Reinigungsleistung zufrieden?

- Ja  Nein, weil

### Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und

verwende **Protefix®** Aktiv-Reiniger seit \_\_\_\_\_.

### Ihre persönlichen Daten

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg. Weitere Informationen unter: [www.protefix.de](http://www.protefix.de) oder E-mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de).



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen?

## Dafür gibt es **Protefix®** Wund- und Schutzgel.

**Protefix®** Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Druckstellen unter Zahnspangen oder Prothesen und bei Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Zahnspange oder der Prothese,
- lindert den Schmerz,
- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.



**Protefix®** Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.

580440